

お客様各位

株式会社東機貿

弊社取扱い人工呼吸器の停電時の動作、バッテリーに関するお知らせ

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

東京電力及び東北電力にて実施されます停電措置に関しまして弊社取扱い製品の停電時の動作、バッテリー駆動時間、再充電時間について、下記のとおりお知らせ致します。詳しくは添付文書、取扱説明書をご参照頂きます様お願い致します

今後とも変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。

敬具

記

	停電時の動作	バッテリー 駆動時間 ※1 ※2	再充電時間
HT50	アラーム音とアラームメッセージを表示し、内部バッテリーにより作動継続	最大 10 時間	最大 8 時間
HT70	アラーム音、アラームランプ、アラームメッセージを表示し、内部バッテリーにより作動継続	最大 10 時間	最大 3 時間
e360	アラーム音、アラームランプ、アラームメッセージを表示し、内部バッテリーにより作動継続	最大 1 時間	最大 16 時間
e500	アラーム音、アラームメッセージを表示し、内部バッテリーにより作動継続	最大 90 分	最大 16 時間
E100S、E100M	アラーム音とアラームランプを表示し、内部バッテリーにより作動継続	最大 8 時間	最大 16 時間
E150	アラーム音、アラームメッセージを表示し、内部バッテリーにより作動継続	最大 1 時間	最大 18 時間
E200	作動停止し、アラーム音を発する	内蔵バッテリー未搭載	-
SLE2000 シリーズ	作動停止し、アラーム音を発する	内蔵バッテリー未搭載	-
SLE5000	アラーム音とアラームメッセージを表示し、内部バッテリーにより作動継続	最大 1 時間	最大 24 時間

※1 バッテリー駆動時間は設定により異なる場合があります。

※2 表示している時間は放電劣化がなく 100%充電されている状態でのバッテリー駆動時間です。内蔵バッテリーの駆動時間は寿命により変化し、その寿命は経年劣化や放電深度に影響を受けますので、バッテリーの寿命が短くなると、駆動時間は短くなります。

以上