

在宅で「人工呼吸器 HT50 及び HT70」をお使いの 患者様及びご家族の皆様へ

お知らせ

株式会社 東機質

この度の東日本大震災により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
計画停電は基本的に「不実施が原則」とされているものの、万が一電力の需給バランスが悪化した場合には、計画停電が実施されることも考えられますので、人工呼吸器 HT50 及び HT70 の「バッテリー」や「停電時の人工呼吸器の警報及び表示」につきまして再度ご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

【対象機種のパッケージ駆動時間】

項目	機種	ニューポートベンチレーター モデル HT50	ニューポートベンチレーター モデル HT70
内蔵バッテリー駆動時間		最長 10 時間	
外部バッテリー駆動時間		最長 5 時間	

【停電発生時の人工呼吸器の警報・表示(メッセージ)及びご確認方法】

項目	機種	ニューポートベンチレーター モデル HT50	ニューポートベンチレーター モデル HT70
外部電源途絶警報		間欠的 3 連続ビープ音 (ピー・ピー・ピー)	間欠的 3 連続ビープ音 (プププ)
LED ランプ		「内蔵バッテリーテスト」LED ランプ ⇒ 橙に点滅 ⇒ 消音ボタン押すと橙に点灯 「外部電源/バッテリー充電」LED ランプ ⇒ 赤く点灯	「ハンドル部警報」LED ランプ ⇒ 橙に点灯 (外部電源 LED が消灯)
表示されるメッセージ		「No ext power」	「外部電源途絶：バッテリーにて駆動中」
確認方法		外部バッテリーに接続してください。 「外部電源/バッテリー充電」LED ランプが緑色に点灯することを確認 してください。	外部バッテリーに接続してください。 外部電源 LED ランプが緑色に点灯 することを確認してください。

(外部バッテリーの接続方法等、不明点等がございましたら、下記の【お問い合わせ先】までご連絡ください。)

【ご使用上の注意】

- 人工呼吸器内蔵バッテリーについては、未使用及び使用中にかかわらず、充電レベルを維持するため出来る限りコンセント等に接続して下さい。
- 外部バッテリーについては、使用後は直ぐにフル充電し保管して下さい。また使用しない場合でも、最低3カ月に1度はフル充電して下さい。

【計画停電実施の考え方について】

経済産業省ホームページの「節電」ページ(<http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html>)等をご参照下さい。

【お問い合わせ先】(緊急連絡先は弊社担当営業又はホームケア製品部：24 時間相談窓口)

販売元：株式会社 東機質 **ホームケア製品部** Tel 03-5762-7256 Fax 03-5762-7257

札幌支店 Tel 011-717-0350 Fax 011-758-3901

仙台支店 Tel 022-211-4551 Fax 022-211-4510

名古屋支店 Tel 052-775-7800 Fax 052-775-7830

大阪支店 Tel 06-4790-3100 Fax 06-4790-3101

福岡支店 Tel 092-271-4695 Fax 092-271-4669