

2011年11月

お客様 各位

株式会社 東機賢
株式会社 佐多商会

お知らせ

日本呼吸療法医学会ホームページに、2011年11月8日付で人工呼吸管理安全対策委員会よりNPPVにおける注意喚起警告文が発行されました。

内容につきましては、日本呼吸療法医学会のホームページをご参照ください。

<http://square.umin.ac.jp/jrcm/contents/guide/index.html>

現在弊社と致しまして、詳細を確認中でございますが、それまでの間、下記の【お願い】にご注意頂きながらご使用いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

【対象製品】

スターメッド ヘルメット型マスク

【お願い】

スターメッド ヘルメット型マスクを人工呼吸器と併用する場合は、ヘルメット型マスクの安全バルブ解放時等において、人工呼吸器の持続的な警報が作動することをご確認ください。また、警報機能付パルスオキシメータ等の患者モニタを併用して患者さんの状態を常時観察してください。

【参考】 (スターメッド ヘルメット型マスク 添付文書の【警告】【使用上の注意】より抜粋)

【警告】

- ・ 警報機能付パルスオキシメータ等の患者モニタを併用してください。
- ・ 安全バルブが外部から押されることにより、安全バルブが解放され、エアリークが生じることがあります。使用する人工呼吸器により、自動では正常に換気が再開始されない場合があります。エアリークが生じた場合に、人工呼吸器が警報を発するよう警報設定を行い、発生した警報に適切に対処してください。

【使用上の注意】

- ・ 使用開始直後、患者アクセスポート使用后等、換気・加圧を開始するために、呼吸回路内のフロー・圧の上昇が必要な場合があります。安全バルブノブを引く、人工呼吸器の吸気ホールドの使用、ヘルメットを外部から圧迫する等の手順により、換気・加圧が開始できます。併用する人工呼吸器等により異なるので、詳細は弊社までお問い合わせください。

【ご連絡先】

販売元:(株)東機賢 クリティカルケア製品部

Tel 03-5762-7252 Fax 03-5762-7253

製造販売元:(株)佐多商会 品質保証部

Tel 03-5762-3007 Fax 03-5762-3036