

呼吸回路に関する お知らせ

弊社取扱いの呼吸回路をより安全にお使いいただくため、お客様よりお寄せいただいた事例についてお知らせいたします。

■事例

呼吸回路と加温加湿チャンバとの接続部のキャップが緩んでいたため、低圧警報が作動した。

■お願い

使用前及び使用中に、呼吸回路の接続部分や組み込まれているキャップ等に、緩みがないか必ずご確認いただきますよう、お願い申し上げます。なお、下記のように添付文書にて、注意喚起を行っておりますのでご確認ください。

■ご注意 (弊社取扱いの呼吸回路の添付文書より抜粋)

【警告】

- ・使用前及び使用中に、回路が正しく組み立てられ、各接続部（回路、Yピース、加温加湿チャンバ、呼気弁、呼気弁チューブ、温度プローブ、ウォータートラップ、気道内圧チューブ等）が適切にしっかりと緩みなく接続されていることを確認してください。[外れやリーク、閉塞があった場合、正しく換気が行われない可能性があります。]

■お問い合わせ先

製造販売元：株式会社 佐多商会 品質保証部	Tel 03-5762-3007	Fax 03-5762-3036
販売元：株式会社 東機貿 クリティカルケア製品部	Tel 03-5762-7251	Fax 03-5762-7253
ホームケア製品部	Tel 03-5762-7256	Fax 03-5762-7257
札幌支店	Tel 011-717-0350	Fax 011-758-3901
仙台支店	Tel 022-211-4551	Fax 022-211-4510
名古屋支店	Tel 052-775-7800	Fax 052-775-7830
大阪支店	Tel 06-4790-3100	Fax 06-4790-3101
福岡支店	Tel 092-271-4695	Fax 092-271-4669