

2011年12月

お客様各位

株式会社 東機貿
株式会社 佐多商会

重要なお知らせ

リネット社製ベッド エレガンザ 3XC およびエレガンザ 3 につきまして、製造業者より改修の連絡を受けましたので、お知らせ申し上げます。お客様にはご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。本改修につきまして、ご理解、ご協力を賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

【改修対象】

- 1) 販売名：医療用電動ベッド 届出番号：13B1X00074000039
製品名：エレガンザ 3XC カタログ番号：1GV07045-95、1GV07045-150
製造番号：20100018109～20100100745
- 2) 急性期病棟用ベッド 製品名：エレガンザ 3 カタログ番号：1GZ07045-29、1GZ07045-165
製造番号：20090282719～20100104316

合計：85台

【理由】

本製品のモビリフトハンドルが収納されずにベッドを移動中等に外部からの衝撃を受けてハンドルが破損した場合、破損部が鋭利となり、操作者等が怪我する可能性があります。また衝撃によってハンドルにひびが入った場合、ハンドル使用時に破損して、患者様が転倒する可能性が考えられます。なお、本件につき、これまでに国内外を通じて、健康被害の報告はありません。(モビリフトハンドルは、ベッドからの立ち上がりや離床する際の補助支えとなる杖としての役割を果たします。)

【対応理由】

改修対象のモビリフトハンドルにつきまして、プラスチック素材の強度を高めた改良品に交換する自主改修を、実施させていただきます。改修作業につきましては、ご連絡を差し上げご相談の上、準備が整い次第、作業を実施させていただきます。

【お願い】

- ・改修作業終了までは、モビリフトハンドルのご使用を控えてください。
- ・ベッドを移動する場合は、モビリフトハンドルが常に収納された状態であることをご確認ください。

【お問合せ先】

販売元	：株式会社 東機貿	病院設備部	Tel 03-5762-7296	Fax 03-5762-7297
		札幌支店	Tel 011-717-0350	Fax 011-758-3901
		仙台支店	Tel 022-211-4551	Fax 022-211-4510
		名古屋支店	Tel 052-775-7800	Fax 052-775-7830
		大阪支店	Tel 06-4790-3100	Fax 06-4790-3101
		福岡支店	Tel 092-271-4695	Fax 092-271-4669
製造販売元	：株式会社 佐多商会	品質保証部	Tel 03-5762-3007	Fax 03-5762-3036